

Складной переносной массажный стол двух секционный



NIRVANA


Для столов TS20111, TS2010



Руководство пользователя

Важные предупреждения

1. При сборке убедитесь, что все винты зафиксированы и фиксирующий трос не порван и не изношен. Убедитесь, что нет трещин на алюминиевой структуре.
2. Не перегружайте стол за пределы рекомендованного веса пользователя. Это может привести к серьезной травме пользователя. Данный продукт протестирован при максимальной рабочей нагрузке 250 кг.
3. Не используйте чистящие средства, на основе спирта при чистке винилового покрытия. Это может привести к повреждению винилового материала. Используйте теплую мыльную воду и вытрите насухо.
4. Убедитесь, что при использовании стола все четыре ножки находятся на одном уровне. Использование ножек на разных уровнях может привести к неустойчивости стола и к травме.
5. Не позволяйте детям собирать или разбирать массажный стол, если они не под наблюдением.
6. Будьте осторожны при использовании острых предметов, поскольку они могут повредить покрытие. Держите покрытие стола подальше от контактов с острыми предметами.

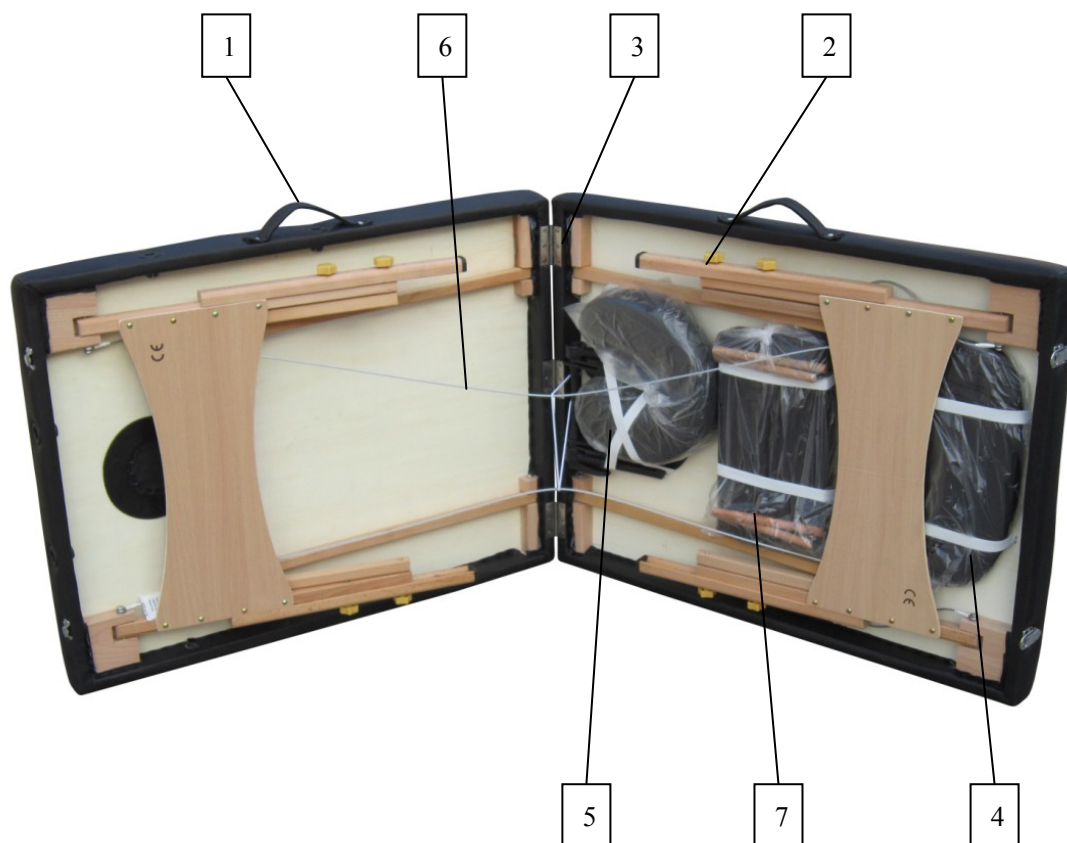

1. Ручка
2. Регулировочная ручка
3. Крепление
4. Лямка
5. Подголовник
6. Фиксирующий трос
7. Боковые опоры

Сборка стола

Этапы сборки указаны ниже:



1. Расстегните застёжку.
2. Положите стол на бок на пол, откройте стол с четырьмя максимально вытянутыми ножками.
3. Достаньте все принадлежности и затем поднимите стол вверх, пока ножки не встанут на пол.
4. Вставьте каркас подголовника в соответствующие отверстия и разместите подушку подголовника в каркас.
5. Наденьте подголовник, затем вставьте подлокотники с обеих сторон стола в отверстия.
6. Стол готов к использованию.

Высота стола регулируется с помощью кнопок на ножках. Все четыре ножки должны быть отрегулированы таким образом по очереди. Убедитесь, что все ножки отрегулированы на одинаковом уровне высоты.

Складывание и транспортировка стола



1. Снимите все аксессуары.
2. Положите стол на бок.
3. Положите все аксессуары под эластичные фиксирующие тросы под верхний шпон.
4. Сложите стол и зафиксируйте застежку.
5. Положите массажный стол в сумку для переноски.

Носите стол как чемодан, взявшись за ручку.

Внимание: Если рама/ножки/конструкция стола повреждены в каком-либо месте, вам не следует использовать стол. Использование стола с повреждениями может причинить вред или серьезные травмы для вас или вашего пациента. Следует немедленно устранить все неполадки.